



1120[Ⓢ]
mg/dL

Guía de adhesión de sensores FreeStyle Libre

Estas son algunas recomendaciones que puede seguir para ayudar a mantener el sensor en su lugar



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA PIEL PARA UNA ADHESIÓN ÓPTIMA

1. LAVADO

Solo utilice **jabón no humectante y sin fragancia** para lavar la zona donde aplicará el sensor.

2. LIMPIEZA

Utilice una toallita con alcohol para **eliminar cualquier residuo oleoso**.

3. SECADO

Deje que su piel se seque por completo antes de aplicar el sensor. Esto es especialmente importante si planea aplicar el sensor después de ducharse o de nadar.

PRODUCTOS QUE BRINDAN ADHERENCIA ADICIONAL*

VENDAJE SUPERFICIAL

Un adhesivo de grado médico; vendaje o cinta†.



SKIN TAC™ DE TORBOT

Una barrera para la piel de tipo adhesivo hipoalergénica y sin látex.

Torbot.com

TEGADERM I.V.

Una película transparente que proporciona resistencia adhesiva.

3m.com

TOALLITAS CON BARRERA PROTECTORA SKIN-PREP®

Apósito protector líquido que ofrece permeabilidad a la piel, de manera que las cintas y las películas se adhieren con mayor firmeza.

Smith-nephew.com

ADHESIVO LÍQUIDO MASTISOL®

Adhesivo líquido transparente, no irritante, no soluble en agua que sujeta los apósitos incluso en áreas húmedas.

Eloquesthealthcare.com

RECORDATORIOS SOBRE ELEMENTOS QUE NO DEBEN ENCONTRARSE ENTRE EL SENSOR Y SU PIEL



- Humedad de cualquier tipo.
- Vellos. Considere afeitarse el área de aplicación.
- Residuos oleosos de jabón, emulsión, shampoo o acondicionador.

RECOMENDACIONES PARA MANTENER EL SENSOR EN SU LUGAR




SEA CUIDADOSO

Tenga cuidado de que el sensor no quede atrapado en objetos como puertas, puertas de automóviles, cinturones de seguridad y bordes de muebles.



NO SE APRESURE

Al vestirse o sacarse la ropa, tenga cuidado de que el sensor no quede atrapado en las prendas.

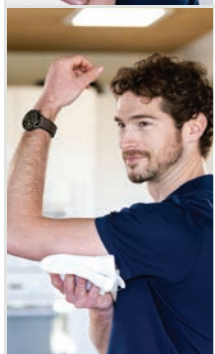


SEQUE DANDO TOQUES

Después de ducharse o de nadar*, tenga especial cuidado cuando se esté secando con una toalla para evitar atrapar o arrancar el sensor.



JUEGUE DE MANERA SEGURA

Si practica deportes de contacto y realiza ejercicio intenso, fije el sensor en la parte posterior y superior de su brazo para minimizar el riesgo de que este se salga.

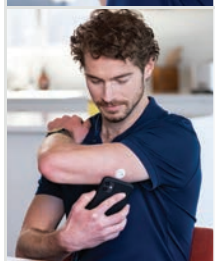

VÍSTASE DE FORMA ADECUADA

Otorgue al sensor un espacio amplio usando ropa holgada† y materiales livianos.



MANTENGA SUS MANOS FUERA

Intente no jugar, tirar o tocar el sensor mientras lo usa.

Estamos aquí para ayudarlo. Para obtener más ayuda con la adhesión del sensor, comuníquese con el **Servicio de Atención al Cliente de Abbott llamando al 1-855-632-8658.**

El equipo está disponible los 7 días de la semana, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora del Este (excepto días feriados).

**FreeStyle**
Libre

**Abbott**
life. to the fullest.®

*El sensor es resistente al agua hasta 1 metro (3 pies) de profundidad. No lo sumerja durante más de 30 minutos.

†El lector captura datos del sensor a una distancia de entre 1 y 4 cm (0.39 a 1.57 pulgadas).

Información importante de seguridad

Sistema FreeStyle Libre de 14 días: Si no se utiliza el sistema FreeStyle Libre de 14 días según las instrucciones en el etiquetado, se puede evitar la detección de un evento grave de niveles de glucosa bajos o altos o no tomar una decisión sobre el tratamiento, lo que puede provocar daños. Si las lecturas no coinciden con los síntomas ni con los resultados previstos, utilice el valor indicado por un glucómetro mediante una punción en el dedo para tomar decisiones sobre el tratamiento. Busque atención médica cuando corresponda o comuníquese con Abbott llamando al 855-632-8658 o visite <https://www.FreeStyle.abbott/us-en/safety-information.html> para obtener información de seguridad.

Sistemas FreeStyle Libre 2 y FreeStyle Libre 3: Si no se utiliza el sistema FreeStyle Libre 2 o FreeStyle Libre 3 según las instrucciones en el etiquetado, se puede evitar la detección de un evento grave de niveles de glucosa bajos o altos o no tomar una decisión sobre el tratamiento, lo que puede provocar daños. Si las alertas y las lecturas de glucosa no coinciden con los síntomas ni con los resultados previstos, utilice el valor indicado por un glucómetro mediante una punción en el dedo para tomar decisiones sobre el tratamiento. Busque atención médica cuando corresponda o comuníquese con Abbott llamando al 855-632-8658 o visite <https://www.FreeStyle.abbott/us-en/safety-information.html> para obtener información de seguridad.

La forma circular de la carcasa del sensor, FreeStyle Libre y las marcas de identificación relacionadas son marcas de Abbott. Otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.